

NEW

骨盤臓器脱の新しい医療機器

(性器脱=子宮脱・膀胱瘤・直腸瘤・小腸瘤・尿道瘤など)

フェミクッション®

このような方に最適です

- リングペッサリーが適さない方
- リングペッサリーを希望されない方
- 手術待ちのためにリングペッサリーを外す方
- 持病などで手術が受けられない方
- 手術を希望されない方
- なかなか通院できない方



特許取得済み

※骨盤臓器脱は平面では受け止められません。
フェミクッションは違和感の無い特殊なクッションで臓器を体内に戻します。
また、体内に挿入・留置するものでないので、臓器・腔粘膜に負担がかからず、
進行も防ぎます。
ご自身で簡単に脱着でき、通常の生活を送っていただくことができます。

フェミクッションの特長と効果

フェミクッションは、これまで辛い思いをされていた患者様のために新しい治療法として考えられた医療機器です。子宮脱、膀胱瘤、直腸瘤、小腸瘤など全ての骨盤臓器脱にお使いいただけます。

フェミクッションは、独自に開発された、クッション、ホルダー、サポーターを組み合わせて、必要なときに患者様ご自身でお使いいただけます。

体内に挿入したり留置するものではないので、臓器や腔粘膜に負担がかからず、最も体に安全な治療法です。クッションによって下から支えてあげることで、リングペッサリーが落ちやすい方でもお使いいただけます。

また他人から知られることのないよう配慮し、下着のように見えるデザインとなっております。

フェミクッションを使用することにより、症状の進行を防ぎ、痛みや出血で辛い日々から解放され、通常の生活を送っていただけます。



膀胱瘤
お腹側にある膣の壁とともに膀胱が下がってくる



直腸瘤
背中側にある膣の壁とともに直腸が下がってくる



子宮脱
子宮が膣の中に下がってくる



小腸瘤 (腔断端脱)
子宮を取った後に膣の壁が下がってくる。



● クッション



臓器を優しく受け止め体内に保持するという最も重要な構成部品です。表面はとても柔らかく、体に安全と言われているシリコンゴム100%を使用しております。




試着例



装着イメージ

● ホルダー

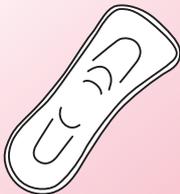

尿やおりものを吸収します。クッションをセットし、サポーターに固定する事によりクッションの前後のずれや膣内への進入を防ぐことができ、安全にご使用いただけます。布製…洗って繰り返しお使いいただけます。使い捨て…旅行の時、または尿漏れの多い方にお勧めです。

使い捨てホルダー 1セット50枚入 (別売)



尿を100cc以上吸収できる専用の尿漏れパッドです



● サポーター



サイズ Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
タイプ ミディー・らくらく

横と縦のベルトを調整することにより、クッション部分を膣口に密着させ、全体を定位置で固定するという、とても大切な役割をしています。

ご注意 市販の下着やガードルでは機能しませんので、必ずフェミクッション専用のサポーターをお使い下さい。

ミディーサポーター



標準タイプです

らくらくサポーター



どなたでも簡単に脱着できるタイプです

※ご購入時にサポーターのサイズとタイプをお選びいただけます。

フェミクッション・スターターキット



日本製



● 洗淨栓

● サポーター


初めてフェミクッションをお使いになる方には、スターターキットをご購入頂きます。(初回に限り、単品でのご購入は出来ません。) 全てのものは共通で入っていますが、サポーターは腰回りに合わせて3つのサイズと、2つの種類からお選びいただけます。

● サポーターのサイズ

サイズ	I	II	III
ウエスト (cm)	60~80	70~90	80~100

※上記以外のサイズにつきましては、別途お問合せください。
 ※クッションはS・M・L全てのサイズが入っています。
 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

サポーターサイズの選定

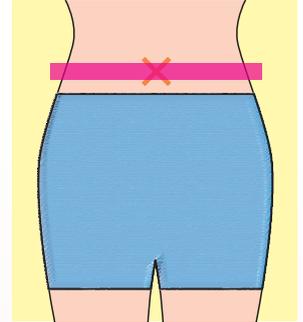

素肌の上で、おへそ周りを測って下さい。
 ※図のピンクの部分をお測り下さい。

パッケージの内容


- クッション (S・M・L)
- ホルダー (S・ML)
- サポーター (I・II・III / ミディ・らくらく)
- 洗淨栓

使用方法

ご注意 フェミクッションはクッション・ホルダー・サポーターの3点を使わないと、骨盤臓器脱の症状は改善されません。単品でのご使用、または、他社製品との併用は絶対におやめ下さい。

準備


クッションとホルダーをセットします。
 最初はSからお使いいただき、乾燥が気になる方はゼリーなどを併用してください。

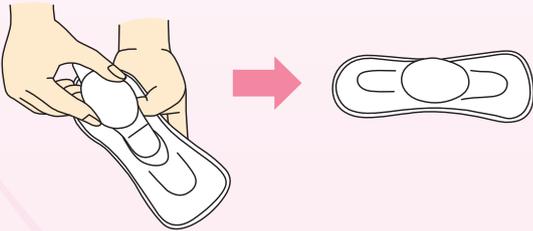

装着


① 準備でセットしたクッション部分が膣口に当たるようにしサポーターを履きます。

必ず臓器が収まった状態で履いてください。
 最初は横になった状態で装着することをお勧めいたします

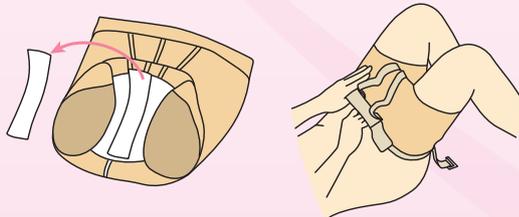

固定

サポーターの横と縦のベルトの調節をし、クッションを下から押し上げ膣口に密着させ、固定が完了します。

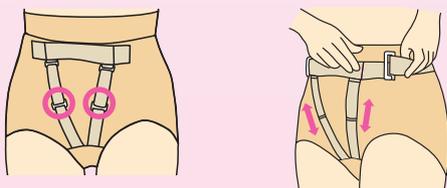


4 トイレでは

横ベルトを外し、サポーターを下ろして排泄を行ってください。排泄後、臓器が出ていない場合はそのまま履いていただけます。もし出ている場合には、臓器を体内に戻してから履いてください。

この時クッションやホルダーはサポーターに付いている状態なので、落ちる心配はありません。

5 お手入れ

一日が終わったら、就寝前に取り外してください。ホルダーとサポーターは手洗いですか、ネットに入れ洗濯し、軽く脱水して乾します。クッションは、裏側の空気穴を洗淨栓で塞ぎ洗淨します。

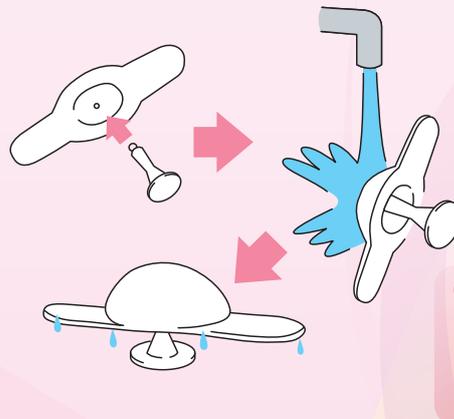

● 洗淨栓



大切な3つのポイント

- ♥ 必ず臓器が収まっている状態で装着
- ♥ 横のベルトを腰骨に引っかける
- ♥ 縦のベルトで持ち上げる

フェミクッション Q and A

Q これで骨盤臓器脱は治るのですか？

A 骨盤臓器脱による不快感やおしっこが出にくいなどの症状は、80%の人に改善が認められたという専門医によるデータがあります。臓器を体内に収めておくことにより、痛みや出血が緩和され、通常の日常生活を行っていただけます。きちんと早めにお使いいただくことにより進行を防ぐことができます。

Q 高齢者にも使えますか？

A 20代から90代まで、幅広い年代の方にお使い頂いています。高齢で手術を受けられない方にも重宝していただいております。

Q 認知症の母にも使用できますか？

A 認知症の重症度によります。自分でトイレに行き排泄ができる場合にはご利用いただけます。また、介助者がいればその方に着脱法などを理解していただく事により、お使いいただけます。

Q 寝たきりの母には使えますか？

A 認知症の方同様、介助者がいればお使いいただけます。

患者様からの声

子宮脱になり、手術しかない、と言われていました。今回、クリニックの先生から進められて購入しました。リングも合わず、日常の不快感に悩まされていましたが、フェミクッションを使用してから、脱の程度が少し減ったと感じています。特に入浴時に不快でしたが、使用してからは着替え時に、ほとんど出てこなくなったので助かります。また、フェミクッションは、リングと異なり、膣の内部に入れることが無いので、使用が楽です。

【東京都在住/年齢不明】

以前は痛みのため、家でじっと座っているだけでしたが、フェミクッションを使うと散歩に行ったり、買い物にも行けるようになりました。

【神奈川県在住/年齢不明】

お腹に力がかかり、家事をするのも億劫でしたが、普通にこなせるようになりました。

【東京都在住/年齢不明】

おかげ様にて、只今はやわらぎました。ももとの状態になります様、念じ乍ら、一日一日を送っています。

【京都府在住/72歳】

膀胱瘤と診断されています。痛みなどのため辛いので、どうしても手術をしたかったのですが、持病のため断られてしまいました。排尿困難もありとにかく不快な毎日でしたが、そんな時医師から紹介され、フェミクッションを知りました。使い始めてからは、お手洗いで気持ち良いくらいシャーつと出るようになりました。私は一生フェミクッションを使って生活するつもりです。【神奈川県在住/68歳】

フェミクッションを着けて1日グッと固定すると、次の日は出てきませんでした。3日間出てこないときもあります。

【神奈川県在住/63歳】

私は毎日23回前後お手洗いにいき、夜中も何回も目が覚めたのですが、フェミクッションを使用してから、10~13回くらいで済むようになりました。お陰様で夜もそんなに起きなくていいので助かっています。

【島根県在住/74歳】

以前は、他人にはわからない状態が悩み、落ちこんで、どうしたらいいかわからない状態でした。体から飛び出してくる物を、指で押し込んだり、押さえたりしながら、普通に歩くのもつらい生活だったのが、今ではフェミクッションをしているおかげで安心感があり、立つのも座るのも歩くのも、不安なく日常生活を送っています。いたずらをして逃げる子供をパッとつかまえることもできます！フェミクッションは寝る時だけはずし、起きたらずっとつけています。現在の症状は、骨盤底筋体操をして、フェミクッションで常に押し込んだ状態にしているおかげか、はずしても以前出っぱっていたものが少し元に戻り、違和感がなくなっています。大げさなようですが、半年前のことを思うとまるで夢のようです。【途中省略】今ではフェミクッションなしの生活は考えられません。【北海道在住/43歳】

フェミクッションは医療費控除が受けられます

生活保護の方は医師またはケースワーカーにご相談ください

製造販売元  株式会社 女性医療研究所[®]
Women's Medical Research Inc. www.urogyne.jp

〒170-0003 東京都豊島区駒込1-31-10 1F

TEL:03-5319-2676

FAX:03-5319-2677