

新登場

Xhold

前立腺全摘出後などにかかる 排尿障害の新しい医療機器 「Xホールド」新登場

エックス

エックスホールド

価格：16,500円(税込)

一般医療機器

脱疾治療用具 / 脱疾治療用ストラップ
届出番号 / 13B2X10096000021

Xホールドは前立腺を摘出した際に
独自開発のクッションを会陰部に当て
尿道括約筋の収縮不全を補い
膀胱頸部の下垂の進行を防ぐことにより
排尿のコントロールが可能となります。



装着イメージ



キット内容

製品の確認および各構成品の名称とはたらき

□ 1 クッション



会陰部を優しく支えるという最も重要な構成
品です。
表面はとても柔らかく、体に安全と言われる
シリコンゴム100%を使用しております。

□ 2 股下ベルト



クッションを固定し、引き上げるための構成
品です。
ランニングシューズなどにも使われている
メッシュ素材を使用し、汗による蒸れなどを
抑えます。

□ 3 腰ベルト



股下ベルトを固定するための構成品です。
お腹周りのサイズに合わせて M・L サイズか
らお選びいただけます。

使用方法


①準備

クッションを股下ベルトに差し込みセットしてください。



②装着

1. 腰に腰ベルトを巻きます。
2. 股下ベルトの長い方を背中にしっかり付けてください。
※背中側の位置が決まりましたら、縫いつけて頂くと便利です。
3. 股を通して、クッションの部分が会陰部の下にくるように当ててください。
4. 股下ベルトを上を引っ張りながら腰ベルト部分に固定します。

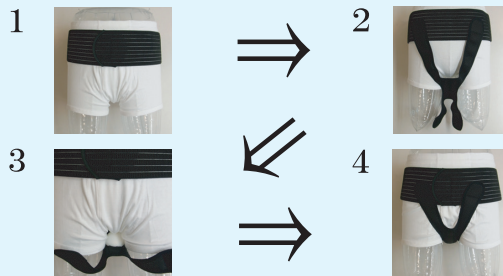

③トイレでは

- ・腰ベルトを外し、全体をゆるめてください。
- ・排便時は下着と一緒に脱いでください。

④お手入れ

- ・クッション…清浄綿やアルコールなどで拭き取り、清潔にお使いください。
- ・腰ベルト、股下ベルト…ネットに入れて、洗濯機で洗ってください。
※乾燥機等使用しないでください。

製造
販売元



株式会社 三井メディカルジャパン

MITSUI MEDICAL JAPAN

www.urogyne.jp

〒170-0003 東京都豊島区駒込1-31-10

TEL: 03-5319-2676 FAX: 03-5319-2677

Mail: information@urogyne.jp